



KIS-PRODUKT

www.kisprodukt.com

BOLNIČKI NAMJEŠTAJ




KREKET SA 4 MOTORA

PODIZANJE

Maksimalna visina plohe kreveta (ne uključujući madrac) u horizontalnom osnovnom položaju je 875mm.

Krevet se dovodi u osnovni horizontalni položaj dugim pritiskom na dugme sa simbolom na na slici ispod.

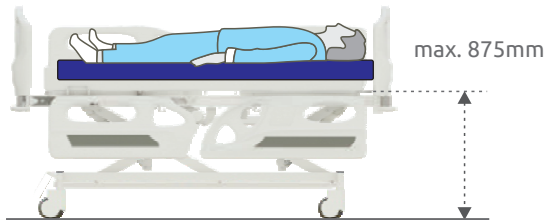


Oznaka na daljinskom upravljaču za podizanje

SPUŠTANJE

Maksimalna visina plohe kreveta (ne uključujući madrac) u horizontalnom osnovnom položaju je 445mm.

Krevet se dovodi u osnovni horizontalni položaj dugim pritiskom na dugme sa simbolom na na slici ispod.

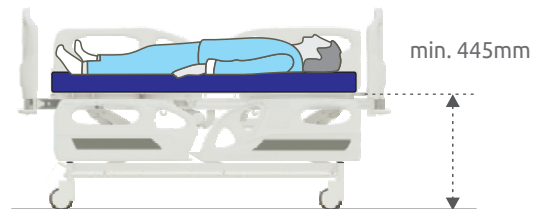


Oznaka na daljinskom upravljaču za spuštanje



UZNOŽJE


Mogućnost podizanja uznožja u odnosu na osnovni (horizontalni) položaj.

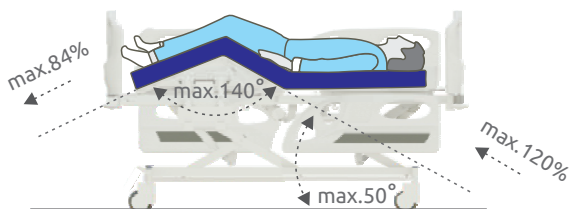

MF oznaka pomjeranje uznožja

UZGLAVLJE


Mogućnost podizanja uzglavlja u odnosu na osnovni (horizontalni) položaj.

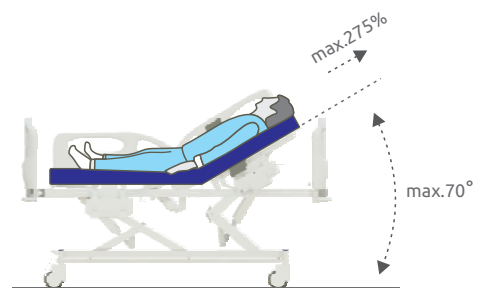

MF oznaka pomjeranje uzglavlja

TR


Najveći ugao koji krevet može da zauzme u osnovnom položaju u funkciji Trendelburg (TR) je 13 stepeni.

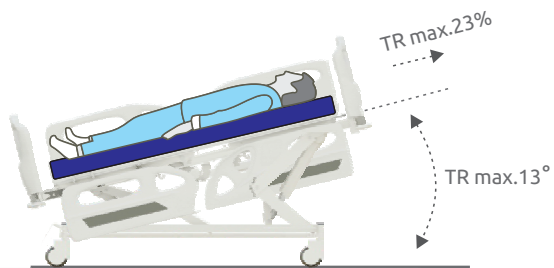

Oznaka na daljinskom upravljaču za TR

RTR

Najveći ugao koji krevet može da zauzme u osnovnom položaju u funkciji Return-Trendelburg (RTR) je 9 stepeni.

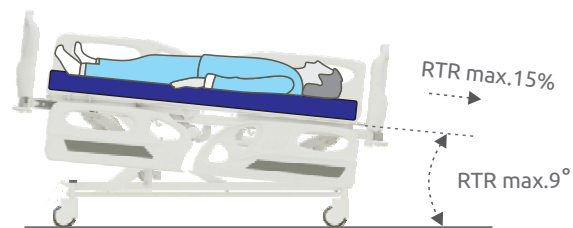


Oznaka na daljinskom upravljaču za RTR



ISTOVREMENO


Mogućnost istovremenog pomjeranja uzglavlja i uznožja do željenog položaja.

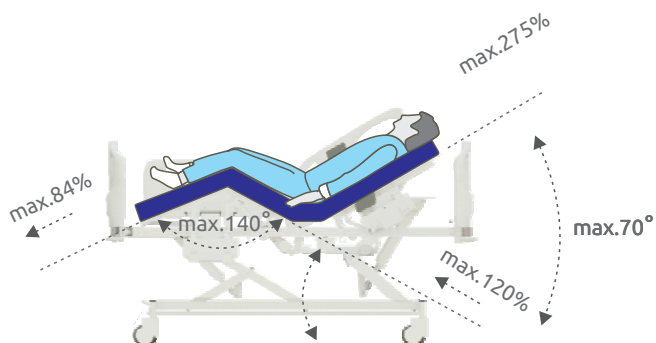

MF oznaka istovremeni pokret

VIŠESTRUKO

Mogućnost istovremenog pomjeranja uzglavlja i uznožja do željenog položaja u kombinaciji sa TR i RTR opcijama..

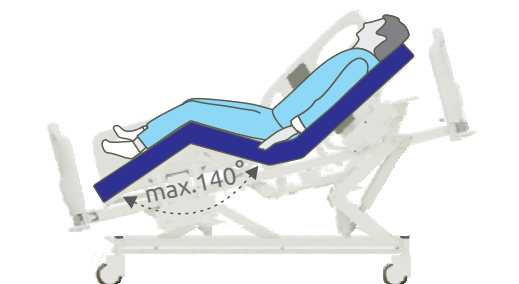



KIS-PRODUKT

www.kisprodukt.com

SERTIFIKAT



za sistem upravljanja prema
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Dokazana je usklađena primjena po pravilniku i potvrđuje se prema
proceduri sertifikovanja za preduzeće

KIS PRODUKT d.o.o. Trn, Laktaši
Nikole Pašića bb
BiH - 78252 Trn

Područje primjene

**Razvoj, proizvodnja, prodaja i ugradnja namještaja (medicinskog,
kancelarijskog, školskog, ugostiteljskog i trgovinskog) i drugih
proizvoda od metala i drveta**

Registarski broj sertifikata: TIC 15 100 179825 Važi do: 2022-08-29
TIC 15 104 161433 Važi od: 2019-08-30

Broj audit izvještaja: 3330 2U5Z D0

Sertifikacija je realizovana u skladu sa TIC-procedurama za auditiranje i sertifikovanje i predmet je
redovnih nadzornih audita.

Handwritten signature
TUV Thüringen e.V.
Služba za sertifikovanje
sistema i osoba



Jena, 2019-08-30



Originalni sertifikat
je dostavljen kućnom poštom.
Važnost sertifikata se može provjeriti na <http://www.tuv-thueringen.de>.
Zertifizierungsbüro des TÜV Thüringen e.V. • Eintr.-Laktašer-Str. 8 • D-07740 Jena • Tel: +49 3641 39314-0 | E: certifizierung@tuv-thueringen.de



Nikole Pašića bb, Trn-Laktaši
Republika Srpska - BiH
Tel: +387 (0)51 585 876
Fax: +387 (0)51 586 330
E-mail: info@kisprodukt.com
www.kisprodukt.com



PRPREMLJENO UZ PODRŠKU:

